

——医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。——

安全な浣腸処置に関するお願い

医療安全管理者(リスクマネージャー)様
グリセリン浣腸「オヲタ」をご使用される皆様

2010年8月

販 売 元

日医工株式会社

富山市総曲輪1丁目6番21

製造販売元 日医工ファーマ株式会社

デイスポーザブル浣腸

グリセリン浣腸「オヲタ」150

グリセリン浣腸「オヲタ」120

グリセリン浣腸「オヲタ」60

グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30

GLYCERIN ENEMA“OHTA”

拝啓 時下ますますご清栄のことと慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

以前より、不適正な浣腸チューブの挿入(長さ)による直腸穿孔等の事例が報告されています。直腸穿孔等を防止するため2008年4月よりストッパーを装着したグリセリン浣腸「オヲタ」を発売しました。しかし、浣腸処置時のチューブ抜去後、肛門内・肛門部にストッパーが取り残される事例が発生したため、2008年8月と12月、浣腸処置前後の安全確認と注意喚起を記載した「適正使用情報」の提供を行ないました。

更に2009年10月、ストッパーの勘合強度を強化した脱落防止のための製品改良を行いました。現在、同様の事例は減少しているものの依然発生しています。

このような事例の再発防止のため、「挿入前」「挿入時」「抜去後」の安全確認事項を改めてご案内させていただきます。

又、弊社では更なる製品の改良を図るべく検討を行っております。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

安全な浣腸処置のために


グリセリン浣腸「オヲタ」

1 挿入前


①ストッパーを赤ラインの先端に合わせる



②アダプターを1回転して開栓する

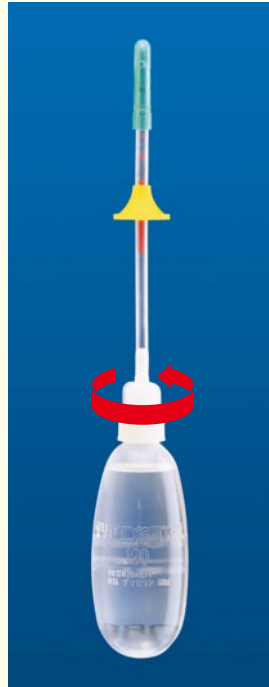

③キャップを回しながらははずす

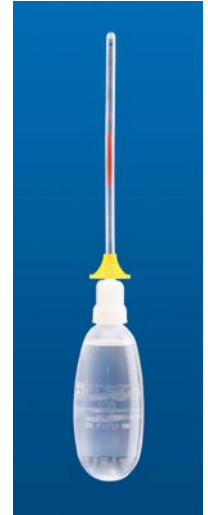

チューブ挿入の長さを適切に保つため、できる限りストッパーをご使用ください。
やむを得ずストッパーをご使用にならない場合は、潤滑剤がとれるのを防ぐため、ストッパーを引き下げてご使用ください。

2 挿入時

ストッパーは肛門内まで挿入しないでください。
(チューブ挿入の目安は、成人：5～7cm、小児：3～4cmです。)

3 抜去後

ストッパーが肛門内または肛門部に取り残されていないか必ず確認してください。

