

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。

**適正使用のお願い**

2008年8月

販売元 日医工株式会社  
富山県富山市総曲輪1丁目6番21

製造販売元 テイコクメディックス株式会社  
東京都中央区日本橋富沢町9番19号

ディスポーザブル浣腸

**グリセリン浣腸「オヲタ」150**

**グリセリン浣腸「オヲタ」120**

**グリセリン浣腸「オヲタ」60**

**グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30**

**GLYCERIN ENEMA“OHTA”**

謹啓

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

2008年4月より新容器ストッパー付きグリセリン浣腸「オヲタ」が発売になりました。すでにご存知のことと存じますが、新容器への変更に至りました経緯は、安全対策の観点より浣腸チューブの挿入の長さを明確にするためにストッパーを付け、より安全にご使用いただくことを目的としたものでした。挿入時につきましては注意喚起をお示ししておりましたが、浣腸処置後のチューブ抜去時、ストッパーと一緒に抜くことの注意喚起をお示ししておりませんでした。ストッパーは可動性のためチューブ挿入および抜去にあたりチューブから抜け落ちませんようご注意くださいことを改めてご案内申し上げます。

つきましては、浣腸処置後の注意喚起を行っていただきますよう「安全な浣腸処置のために」の資材をご提供させていただき、従来ご提供させていただいております「適正使用のお願い」資材と合わせて、引き続き安全対策に万全を図って参りたいと存じます。


今後ともご指導、ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

謹白

# グリセリン浣腸「オヲタ」 安全な浣腸処置のために

ストッパーは可動性のため、チューブ挿入および抜去にあたっては  
チューブから抜け落ちないようにご注意ください。

⚠ チューブ挿入は、ストッパーを持ちながら  
行ってください。

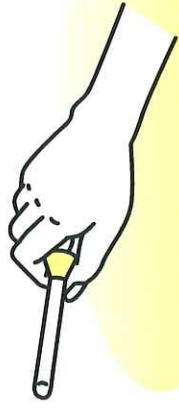

〔図は、成人用〕

⚠ チューブはストッパーと一緒に抜きます。

⚠ 浣腸後は、チューブとストッパーの両方に  
血液の付着など無いか確認してください。