



ヘパリンNaロック用シリンジ「NIG」の使用法

1 ピロー包装を切り口から静かに開封し、シリンジ本体側から取り出してください。

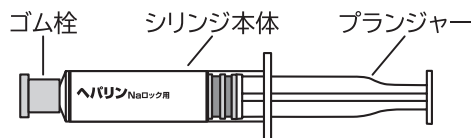

〈注意〉


- ピロー包装内は滅菌済みのため、使用直前まで開封しないでください。
- プランジャーを持って引き出さないでください。

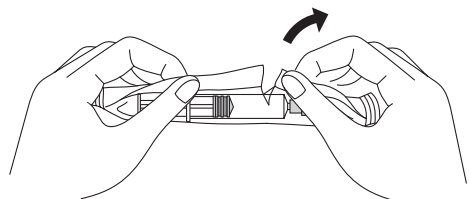

2 ゴム栓を回しながら引き抜いてください。


〈注意〉

- ゴム栓取り外しの際、ゴム栓の先端部をつまみ、シリンジ先端部に指が触れないようにしてください。誤って指が触れてしまった場合は使用しないでください。

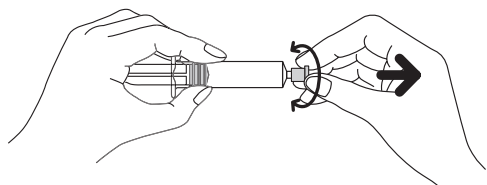

3 シリンジ内の空気を除去後、カテーテル又はエクステンションチューブに接続し、薬液を注入してください。

- 接続部は、必要に応じてアルコール綿で清拭消毒してください。
- プランジャーは回さないでください（外れるおそれがあります）。
- 装着が緩く感じることがありますので、しっかりと奥部まではめてください。

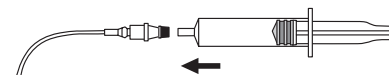

*シリンジ内の空気を抜かずに接続し、ルート内のエア抜きをした後、シリンジ内の空気をプランジャー側に寄せて、薬液を注入する方法もあります。

